

DEWIN[®]

— 东蕴医疗 —

辅助生殖培养用油

Culture Oil



品质
Quality

精确
Precision

责任
Accountability

辅助生殖培养用油

Culture Oil

货号 CAT NO

9350 (100mL/瓶)

医疗器械注册证号:国械注准20233180306

生产许可证号:沪药监械生产许 20202701号

【产品描述】

辅助生殖培养用油由轻质液状石蜡制成。

【适用范围】

用于体外辅助生殖技术中覆盖培养液或培养液滴。

【使用方法】

用无菌的移液管转移瓶中的培养油，勿倾倒移液管。小心将油加入培养皿中直至胚胎培养液或配子缓冲液完全覆盖。培养用油需在37°C、CO₂为5%~6%培养箱中至少平衡过夜后使用。

注：以上仅是推荐的使用方法，实验室可制定或优化使用培养用油的方法。

【注意事项】

- 如果发现瓶子的完整性受损，请丢弃该产品。如果发现产品浑浊请不要使用。
- 培养用油不含抗生素。
- 未按说明书使用可能导致微生物污染或产品性能改变。
- 建议在使用本产品时，严格执行无菌操作技术。
- 请在产品的有效期内使用(有效期见包装瓶标签和该生产批号的质检分析报告)。培养用油开瓶后7天抛弃。
- 本产品不能作为注射用剂使用。
- 建议每个病人培养用油用量20-25mL。

注意：产品使用必须符合医疗部门相关操作规范和法规，仅限于经培训的医务人员和胚胎师使用。



室温、避光储存 有效期 2年

生产工艺



全自动无菌隔离器灌装生产

产品性能



SAL10⁻³

过滤除菌



≥80%

96h 1-细胞鼠胚
囊胚形成率



<0.25EU/mL

细菌内毒素

产品无细胞毒性,附质检分析报告 (COA)

质控保障

东蕴医疗科技(上海)有限公司

DonneVie Medical Technology (Shanghai) Co.,Ltd



上海市闵行区新骏环路138号1幢201室

Suite 201.Bld 1,138 Xinjun Ring, Shanghai



86-021-34781568/34782810/34782825

201114

www.dewinivf.com

info@dewinivf.com