

# DEWIN<sup>®</sup>

— 东蕴医疗 —

## 颗粒细胞去除液 Hyaluronidase Solution



品质  
Quality

精确  
Precision

责任  
Accountability

# 颗粒细胞去除液

## Hyaluronidase Solution

货号 CAT NO  
9309 (1mLx5)

生产许可证号:沪药监械生产许 20202701号  
医疗器械注册证号:国械注准20233180229

### 【产品描述】

颗粒细胞去除液是无菌的液体溶液,含透明质酸酶、人血白蛋白、硫酸庆大霉素的HEPES缓冲的液体。  
根据预期用途,颗粒细胞去除液需在37°C平衡30min后使用。

### 【适用范围】


用于卵母细胞周边的颗粒细胞去除。

### 【使用方法】

用无菌的移液管转移瓶中的颗粒细胞去除液,勿倾倒移液管;  
小心将颗粒细胞去除液加入培养皿中,卵母细胞应完全被覆盖;  
轻轻吸打卵母细胞数次使颗粒细胞松散开来,卵母细胞在颗粒细胞去除液中的时间不能超过1分钟;

整个操作过程使用热台以确保颗粒细胞去除液保持在37°C。

注:以上仅是推荐的使用方法,实验室可制定或优化使用颗粒细胞去除液的方法。

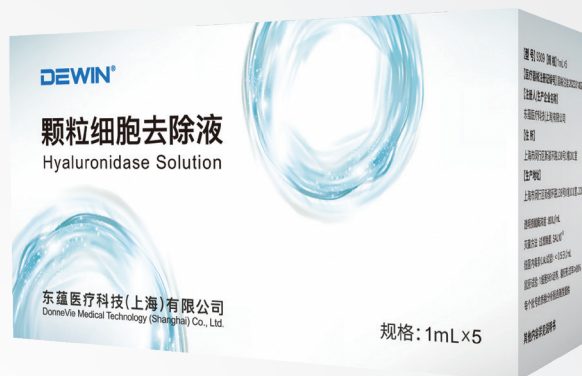

有效期 7个月

储运温度 +2°C +8°C

## 中国首张



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号:国械注准20233180229

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 注册人名称 | 东蕴医疗科技(上海)有限公司            |
| 注册人住所 | 上海市闵行区新骏环路138号1幢201室      |
| 生产地址  | 上海市闵行区新骏环路138号1幢101室、201室 |

全球同类产品NMPA首张注册证

## 生产工艺



全自动无菌隔离器灌装生产

## 产品性能



**SAL10<sup>-3</sup>**  
过滤除菌



**≥80%**  
96h1-细胞鼠胚  
囊胚形成率



**<0.5EU/mL**  
细菌内毒素



**7.2~7.5**  
pH值



**260~295mOsm/kg**  
渗透压

产品无细胞毒性,附质检分析报告(COA)



东蕴医疗科技(上海)有限公司  
DonneVie Medical Technology (Shanghai) Co.,Ltd

上海市闵行区新骏环路138号1幢201室  
Suite 201.Bld 1,138 Xinjun Ring, Shanghai  
86-021-34781568/34782810/34782825

201114  
www.dewinivf.com  
info@dewinivf.com