

DEWIN®

— 东蕴医疗 —

卵泡冲洗液

Follicle Flushing Solution



品质
Quality

精确
Precision

责任
Accountability

卵泡冲洗液

Follicle Flushing Solution

货号/CAT NO

9305 (100mL/瓶)

医疗器械注册证号:国械注准20223180249

生产许可证号:沪药监械生产许 20202701号

【产品描述】

卵泡冲洗液是由符合中国药典标准的注射用水配制的无菌溶液。含多种无机盐、氨基酸、能量底物,硫酸庆大霉素,酚红和肝素钠的HEPES缓冲液。

根据预期用途,卵泡冲洗液在37°C的培养箱中预热后使用。

【适用范围】用于取卵和洗卵。

【使用方法】

卵泡冲洗:

- 用无菌的移液管转移瓶中的20mL卵泡冲洗液在无菌、无毒的一次性使用的试管或培养管中,在37°C的培养箱中预热30min后使用。
- 在取卵前用卵泡冲洗液冲洗取卵针针腔和连接软管。取卵时,用取卵针在超声仪的监控下抽吸成熟卵泡,吸取出的卵泡液应收集在无菌、无毒的一次性使用的培养管中,立即由胚胎实验室进行捡卵,收集卵泡;并在卵泡冲洗液洗卵,去除卵泡周围血污及细胞组织。
- 建议整个操作过程使用恒温台以确保卵泡冲洗液保持在37°C。



有效期 12个月

储运温度 +2°C~+8°C

生产工艺



全自动无菌隔离器灌装生产

产品性能



SAL10⁻³

过滤除菌



≥80%

96h细胞鼠胚囊胚形成率



<0.25EU/mL

细菌内毒素



7.2~7.5

pH值



260~295mOsm/kg

渗透压

产品无细胞毒性,附质检分析报告 (COA)

质控保障

东蕴医疗科技(上海)有限公司

DonneVie Medical Technology (Shanghai) Co.,Ltd



上海市闵行区新骏环路138号1幢201室

Suite 201.Bld 1,138 Xinjun Ring, Shanghai



86-021-34781568/34782810/34782825

201114

www.dewinivf.com

info@dewinivf.com