

DEWIN[®]

— 东蕴医疗 —

卵裂胚培养液

Cleavage Medium



品质
Quality

精确
Precision

责任
Accountability

卵裂胚培养液

Cleavage Medium

货号/CAT NO

9310(25mL)

9311(50mL)

医疗器械注册证号:国械注准20223180496

生产许可证号:沪药监械生产许 20202701号

【产品描述】

卵裂胚培养液是一种含有人血白蛋白和庆大霉素的碳酸氢盐缓冲的培养液。

根据预期用途,培养液在37°C, CO₂浓度为5%~6%培养箱中平衡后使用。

【适用范围】

用于人类卵母细胞受精后至第3天的培养。

【使用方法】

- 将所有的培养皿(微孔或移液管)在使用前用培养液进行冲洗;
- 取卵当天的下午,在培养皿上标记患者ID;
- 使用经过冲洗的无菌枪头,在培养皿中放置培养液滴,用于胚胎培养的液滴应放置在培养外圈位置,其余清洗液滴应放置于培养皿中部;
- 立即盖上东蕴公司的培养用油防止液体蒸发;
- 随后立刻将培养皿置于37°C、CO₂浓度为5%或6%的培养箱中,并移除培养皿盖斜靠在培养皿边上;
- 培养皿必须以半开盖形式在培养箱中平衡至少6小时,不得超过18小时;
- 将胚胎放置在培养皿的液滴中,每50μL培养液滴中建议放置胚胎数不得大于5个;
- 在第2天或第3天时可将胚胎移植回子宫,或者继续在囊胚培养液中培养至第5天将移植回子宫。



有效期 4个月

储运温度 +2°C~+8°C

生产工艺



全自动无菌隔离器灌装生产

产品性能



SAL10⁻³

过滤除菌



≥80%

96h 细胞鼠胚
囊胚形成率



<0.25EU/mL

细菌内毒素



7.2~7.5

pH值



265~285mOsm/kg

渗透压

产品无细胞毒性,附质检分析报告(COA)



东蕴医疗科技(上海)有限公司

DonneVie Medical Technology (Shanghai) Co.,Ltd



上海市闵行区新骏环路138号1幢201室

Suite 201.Bld 1,138 Xinjun Ring, Shanghai



86-021-34781568/34782810/34782825



201114



www.dewinivf.com



info@dewinivf.com